

Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten!)

Maße	Verona	Monaco	Cannes	Nizza
Höhe-Sitz (variabel)	42 - 57 cm			
Höhe m. Armlehne	-----	-----	61 - 76 cm	-----
Höhe m. Rückenlehne	-----	-----	-----	83 - 98 cm
Sitzfläche	Ø 36 cm	■ 40 x 40 cm	■ 40 x 40 cm	■ 40 x 40 cm
Platzbedarf-Stellfläche	■ 40 x 40 cm	■ 45 x 45 cm	■ 45 x 53 cm	■ 51 x 53 cm
Verstellung-Sitzhöhe	7-fach/je 25 mm	7-fach/je 25 mm	7-fach/je 25 mm	7-fach/je 25 mm
Gewicht	2,6 kg	2,8 kg	3,6 kg	4,8 kg
Gewicht (Person)	max. 175 kg	max. 130 kg	max. 130 kg	max. 130 kg

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Benennung	Bemerkung/Farbe
463.90.20	Armlehnen (inkl. Clips)	Kunststoff, weiß
463.90.30	Rückenlehne (inkl. Clips)	Kunststoff, weiß
463.90.40	Überwurfmutter	Kunststoff, weiß
201.90.28	Clip für Standbeine (Höhenverstellung)	rund, weiß
463.90.60	Clip zur Befestigung von Arm- und Rückenlehne	eckig, rot
442.00.25	Stopfen für Standrohr	Kunststoff, schwarz
456.00.25	Fußkapsel für Standrohr	Kunststoff, weiß

Zubehör

284.00.30	Reisetasche mit Duschhilfe	Textil, schwarz
-----------	----------------------------	-----------------

Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz bestimmt. Der Wiedereinsatz (Lebensdauer) ist abhängig vom Produktzustand. Vor dem Wiedereinsatz ist bei dem Produkt eine Wartung durchzuführen und die entsprechenden Anweisungen zu Sicherheit, Pflege und Wartung sind zu beachten und einzuhalten.

Diese Überprüfung soll eine unsachgemäße Benutzung durch mögliche oder direkt erkennbare Schäden ausschließen. Wir verweisen hier auf das Medizinproduktgesetz (MPG) und die Betreiberverordnung (MPBetreibV).

Lebensdauer

Die zu erwartende Lebensdauer der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Produkte beträgt bei bestimmungsgemäßen Gebrauch, Einhaltung der Sicherheitshinweise, Wartungsintervalle und Pflegehinweise **3 Jahre**. Über diesen Zeitraum hinaus kann das Produkt nur in einem sicheren Produktzustand weiter verwendet werden. Eine Wartung sollte dann mindestens jedes halbe Jahr erfolgen. Besondere Anforderungen an das Produkt, bedingt durch die Nutzung des Patienten, können kürzere Wartungsintervalle hervorrufen.

Gewährleistung

Auf unsere Duschhilfen geben wir eine Garantie von **24 Monaten**. Hiervon sind alle Verschleißteile ausgeschlossen, sowie Schäden durch unsachgemäße Behandlung der Toilettenhilfe. Zu Ihrer Sicherheit und aus Gründen der Produkthaftung dürfen Instandsetzungen nur von der Firma REBOTEC oder von autorisierten Fachhändlern unter Verwendung von Original-Ersatzteilen vorgenommen werden.

Hinweis !

Diese Bedienungsanleitung können Sie über unsere Homepage www.rebotec.de ansehen. Dies ermöglicht Informationen auszudrucken und bei Bedarf vorzulesen.



Bedienungsanleitung

BA-Nr.: 01.08.076/2016-12



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
 DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
 Telefon: 05431/9416-0
 Telefax : 05431/9416-66
<http://www.rebotec.de>
 E-Mail: info@rebotec.de

Serien-Nr. /Produkt

Duschhilfen

**Dusch-Hocker
 „Verona“
 Art.-Nr.: 368.00.30**



**Dusch-Hocker
 „Monaco“
 Art.-Nr.: 363.00.10**



**Dusch-Hocker
 „Cannes“
 Art.-Nr.: 363.00.20**



**Dusch-Stuhl
 „Nizza“
 Art.-Nr.: 363.00.30**



Zweckbestimmung

Die Duschhilfen sind nur im Innenbereich (häuslich/stationär) auf ebenen Flächen verwendbar und für die Anwendung der Duschbenutzung geeignet. Er dient bei physischer Funktionseinschränkung zur Erhöhung der Selbstständigkeit bei der Duschbenutzung. Trotz optimalen Sitzkomforts sind die Duschhilfen nicht für längeres Sitzen geeignet.

Hinweis !

Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.

Die identische Serien-Nr./Produkt in der BA ist auch auf dem Typenschild (Unterseite des Duschsitzes) des Produktes aufgedruckt. Bei Beanstandungen oder Rückfragen geben Sie bitte Typ, Serien-Nr. und BA-Nr. an.

Produktthnweise

Das Rohrgestell besteht aus Aluminiumrohr. Die Sitzhöhe ist einstellbar (7-fach) über Teleskopierung der Aluminiumrohre. Die Sitzplatte, Armlehnen und die Rückenlehne sind aus Vollkunststoff. Die Fußkappen für die Standbeine sind aus rutschhemmendem Kunststoff. Die Duschhilfe kann über eine einfache Clipmontage montiert bzw. wieder demontiert werden und trägt damit zur Mobilität für einen Ortswechsel bei.



Inbetriebnahme

Die Duschhilfe ist nicht gebrauchsfertig und muss vor Inbetriebnahme montiert werden. Vor der Montage prüfen Sie anhand des Beipackzettels ob alle Teile vorhanden sind.

Je nach Modell kann der Teileumfang abweichen!

Modell Verona und Monaco

- Sitzplatte (A) auf eine ebene Fläche legen
- Überwurfmutter (B) durch Linksdrehung (gegen den Uhrzeigersinn) lösen.
- Rohrsatz (C) in das Spannelement (D) bis zum Anschlag einstecken.
- Rohrsatz so drehen, dass Clip (F) nach außen zeigt. Auf einheitliche Montage achten!
- Überwurfmutter (B) durch Rechtsdrehung fest verschrauben.
- Die anderen 3 Rohrsätze genauso montieren.
- Clip (F) ganz herausziehen u. die Sitzhöhe durch Herausziehen des Innerrohres einstellen.
- Clip (F) wieder durch die Bohrung im Rohrsatz stecken. **Achtung! Clip ganz eindrücken.** Dies ist erkennbar, wenn der Clip ganz am Alurohr anliegt.
- **Achtung! Alle 4 Standbeine in gleicher Höhe einstellen.**
- Nach der Montage die Standsicherheit der Duschhilfe überprüfen!

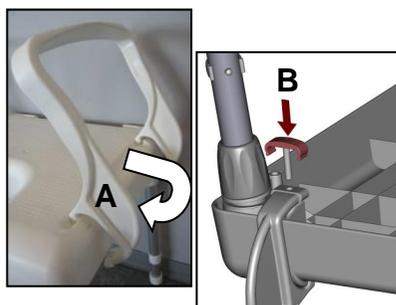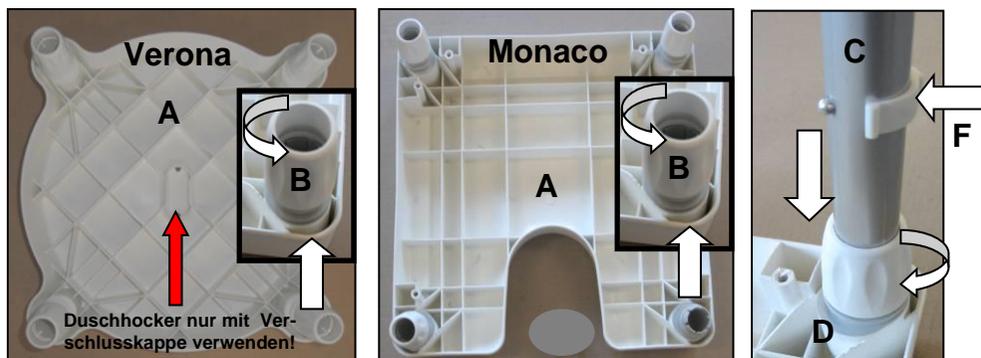


Modell Cannes

Montage wie bei Modell Monaco

Zusätzliche Montage:

- Armlehnen (A) auf der Sitzplatte festklemmen. Darauf achten das die Klemmvorrichtung unterhalb der Sitzplatte einrastet.
- Armlehnenstege etwas auseinander ziehen bis Bohrungen deckungsgleich sind und mit Clip (B) befestigen.
- **Achtung! Clip ganz eindrücken.** Dies ist erkennbar, wenn der Clip ganz am Aluminiumrohr anliegt.

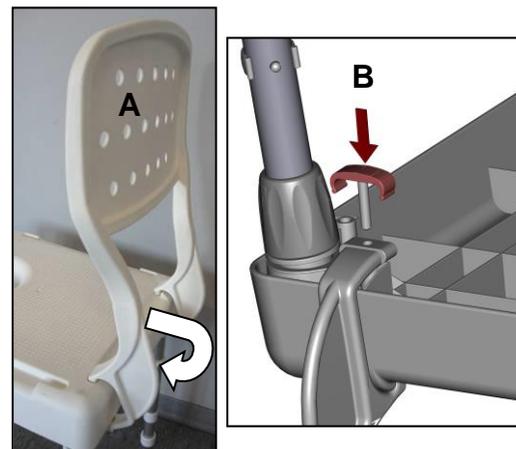

Modell Nizza

Montage wie bei Modell Monaco

Zusätzliche Montage:

- Armlehnenmontage wie beim Modell Cannes
- Rückenlehne (A) auf der Sitzplatte festklemmen
Darauf achten das die Klemmvorrichtung unterhalb der Sitzplatte einrastet.
- Rückenlehne mit Clip (B) befestigen.
- **Achtung! Clip ganz eindrücken.** Dies ist erkennbar, wenn der Clip ganz am Aluminiumrohr anliegt.

Reinigung und Desinfektion

Reinigen Sie das Produkt mit einem milden Haushaltsreiniger. Verwenden Sie kein ätzendes oder scheuerndes Reinigungsmittel. Zur Wischdesinfektion der Oberflächen verwenden Sie ein handelsübliches Desinfektionsmittel (Produktthnweise beachten). Anschließend wischen Sie mit klarem Wasser nach und reiben das Produkt trocken. **Eine mangelhafte oder vernachlässigte Pflege und Wartung führt zur Einschränkung der Produkthaftung.**

Wartung

Bei regelmäßiger Wartung und Pflege Ihrer Duschhilfe erweist Ihnen dieser treue Dienste. Aus Sicherheitsgründen und zur Vorbeugung von Unfällen, deren Ursache nicht rechtzeitig erkannter Verschleiß oder durch unsachgemäßer Behandlung verursachte Schäden seinen können, lassen Sie die Duschhilfe zu Ihrer eigenen Sicherheit **mindestens einmal jährlich** von einem Fachhändler überprüfen.

Hinweis !

[Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.](#)

Die identische Serien-Nr./Produkt in der BA ist auch auf dem Typenschild (Unterseite des Toilettensitzes) des Produktes aufgedruckt. Bei Beanstandungen oder Rückfragen geben Sie bitte Typ, Serien-Nr. und BA-Nr. an.

⚠ Sicherheitshinweise

- **Beachten Sie das auf dem Produkt angegebene max. zulässige Körpergewicht!**
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Duschhilfe auf Beschädigungen. Sollten Schäden erkennbar sein, nehmen Sie die Duschhilfe nicht in Gebrauch!
- **Vorsicht Sturzgefahr !**
- Vor der Benutzung folgende Punkte unbedingt prüfen:
 - ✓ Standfestigkeit der Duschhilfe (Nach der Montage und vor der Benutzung)
 - ✓ Sitzplatte auf Beschädigungen
 - ✓ Clip der Höhenverstellung auf festen Sitz
 - ✓ Je nach Modell die Clipverriegelung von Arm-/Rückenlehne prüfen.
- Die Duschhilfe nicht mit dem Patienten tragen.
- Die Duschhilfe nur im Innenbereich und auf ebenen Untergrund benutzen.
- Je nach Modell darauf achten, dass die Armlehnen und Rückenlehne nur im vollständig montierten Zustand zu verwenden sind.
- Nicht aus der Duschhilfe herauslehnen.