


# Montage Anleitung

## Aufstehsessel Eleva

Danke, dass Sie sich für den Eleva Aufstehsessel von REHASHOP entschieden haben.

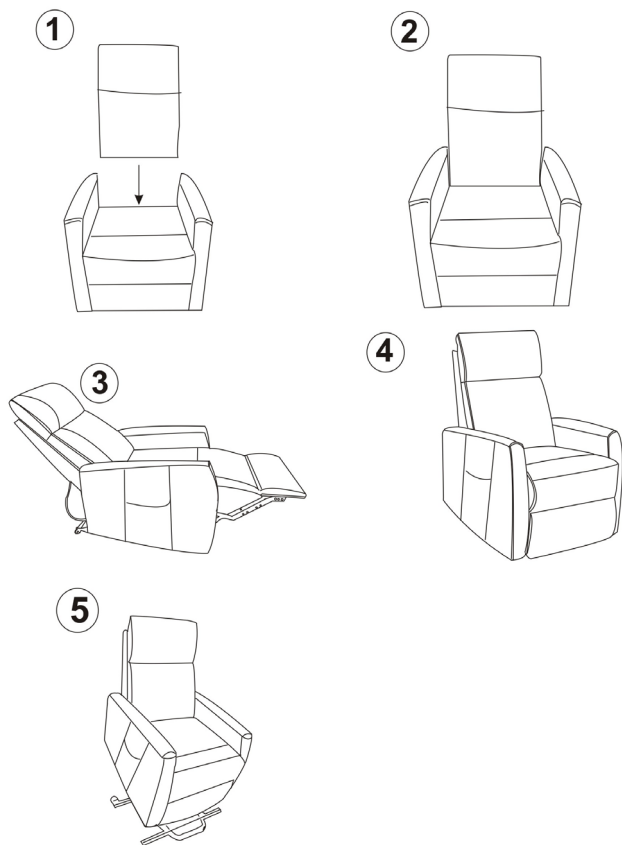

1. Stecken Sie die Rückenlehne in die entsprechende Aufnahmevorrichtung (1) und drücken Sie die Lehne gleichmäßig nach unten, bis diese in der vorgesehene Vorrichtung einrastet (6).



2. Kontrollieren Sie, ob die Stecker vom Motor zur Steckdose und vom Motor zur Fernbedienung eingesteckt sind und festsitzen.

3. Mit der Fernbedienung haben Sie folgende Verstellmöglichkeiten: Der Sessel kann von Sitzposition (2) in Relaxposition (3) und von der Sitzposition (4) in die Aufstehposition (5) verstellt werden.


- Stellen Sie sich nicht auf den Stuhl und benutzen Sie den Sessel nicht als Trittleiter.
- Verwenden Sie den Sessel immer nur für eine Person.
- Setzen Sie sich nur auf den Sessel, wenn alle Schrauben und Knöpfe fest angebracht sind.
- Dieser Sessel sollte nicht benutzt werden, wenn Teile fehlen.
- Ein Nichteinhalten der aufgeführten Warnungen kann zu Verletzungen führen.



# Gebruiksaanwijzing

## Sta-Op Stoel Eleva

Hartelijk bedankt voor de aankoop van de REHASHOP sta-op stoel Eleva.

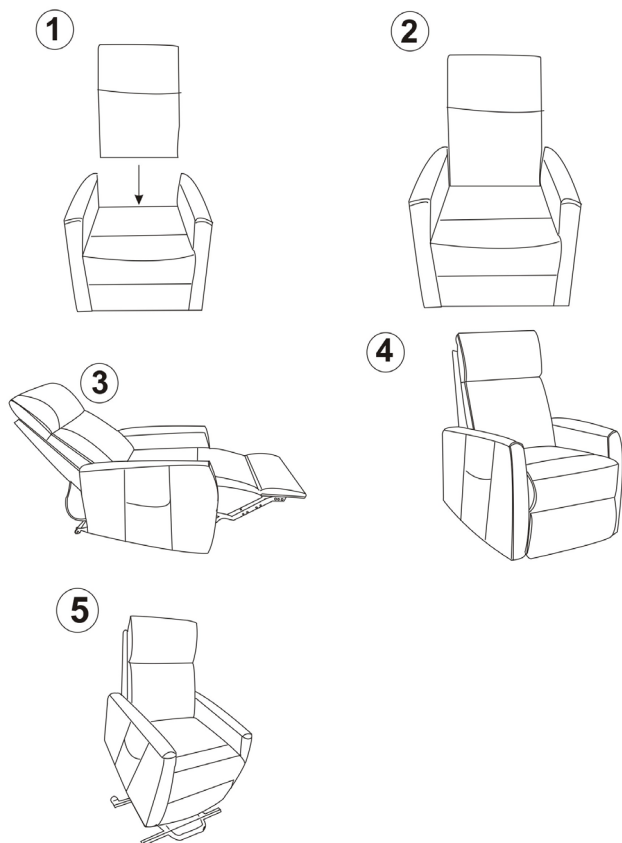

1. Steek de rugleuning in de opname voor de rugleuning, die aan de achterkant van het zitvlak zit (1) en druk de rugleuning gelijkmatig naar beneden tot deze in de opname vastzit. (6)



2. Controleer of de stekkers van motor tot stopcontact en van de motor tot de afstandsbediening goed vast zitten.

3. Gebruik de afstandsbediening om de instelmogelijkheden van uw Eleva fauteuil te testen. De stoel kan van zitpositie (2) naar relaxpositie (3) en van zitpositie (4) naar sta-op-positie (5) ingesteld worden.



- Ga nooit op de stoel staan en gebruik het fauteuil nooit als trap.
- De sta-op stoel is voor het gelijktijdig gebruik van slechts één persoon ontworpen. Gebruik de fauteuil nooit met meerderen tegelijk.
- Gebruik de stoel Eleva slechts wanneer u gecontroleerd heeft, dat alle schroeven vast zitten. Controleer regelmatig of alle schroeven vast zitten.
- Gebruik de Eleva stoel alleen als alle onderdelen aanwezig zijn en goed gemonteerd zijn. Indien onderdelen ontbreken of u beschadigde onderdelen wilt laten vervangen, kunt u met de aanbieder van deze stoel contact opnemen.
- Het niet bevolgen van deze maatregelen kan tot ernstige letsels leiden.